

Ďakujeme Vám za zakúpenie digitálneho analyzátoru 1T07, ktorý meria obsah zvyškového alkoholu vo Vašom dychu a ukazuje možnú mieru intoxikácie.

Návod na použitie

1. Do prístroja vložte dve 1,5V **alkalické** batérie veľkosti AAA. Prístroj prejde ihneď do fázy zahrievanie, na displeji bliká nápis INITIALIZE. Počas zahrievania prebehne automatické vyčistenie a aktivácia senzoru a prístroj je po cca jednej minúte pripravený.
2. Pred použitím analyzátoru si vypláchnite ústa čistou vodou. Pred meraním je treba najmenej 10 minút nefajčiť a nepiť alkohol.
!!! Meranie ihneď alebo veľmi krátko po vypití alkoholu je nepresné a väčšinou dôjde i k poškodeniu meracieho senzora. Reklamácia z tohto dôvodu je potom neoprávnená.
3. Vyklopte otočný náustok kolmo k prístroju. Pre test je možné používať len tento výklopný náustok. V prípade testovania viacerých osôb, z hygienických dôvodov nasadte na náustok dodávanú trubičku, pre každú osobu inú.
4. Stlačením tlačidla prístroj zapnete, prebehne aktivácia testovacieho senzora na dobu cca 20 sekúnd. Na displeji sa objaví „PH“, potom „WAIT“ a na displeji beží odpočítavania do nuly. Na konci odpočítavania zaznie zvukový signál a krátko sa objaví nápis „READY“. Potom začne blikáť nápis „BLOW“, ktorý upozorňuje užívateľa k zahájeniu testu.
Poznámka: Po dlhej dobe nepoužívania sa namiesto symbolov "PH" a "WAIT" objaví symbol "INICIALIZE".
5. Stlačte a držte tlačidlo, ozve sa dlhé pípnutie a nápis „BLOW“ svieti neprerušovane. V tejto chvíli vložte náustok do úst a fúkajte nepretržite po dobu cca 6-7 sekúnd.
6. Po zaznení dvojitého pípnutia prestaňte fúkať, prístroj analyzuje, na displeji bliká nápis „READING“.
7. Nameraná hodnota sa zobrazí na displeji.
 - Pri nameranej hodnote nižšej než 0,2 ‰ sa na displeji zobrazí 0,0 ‰ alebo 0,1 ‰ alkoholu v dychu.
 - Ak nameria prístroj hodnotu medzi 0,2 ‰ a 1,5 ‰ alkoholu v dychu, zobrazí sa nameraná hodnota.
 - Prednastavená úroveň 0,2 ‰ upozorňuje farebným podsvietením displeja na prekročený limit tolerovanej hodnoty pre riadenie motorového vozidla.
 - Pri hodnote vyššej než 1,6 ‰ alkoholu v dychu začne na displeji blikáť „HI“ a „NO DRIVING“.
8. Pre ďalšie meranie znova stlačte tlačidlo.
9. Po štyroch po sebe idúcich meraniach nechajte prístroj 2 minúty v pokoji.
10. Stlačením tlačidla po dobu 2 sekúnd prístroj vypnete. Prístroj sa vypne automaticky po cca 35 sekundách.

Napájanie

1. Batérie – používajte výhradne alkalické batérie 1,5V, nabíjacie batérie s napätím 1,2V sú pre pracovnú činnosť výrobku nedostačujúce. Najmä pri čiastočne vybitých nabíjajúcich batériách môže klesnúť zobrazovacia schopnosť displeja a zariadenie vyhodnotí batérie ako vybité.

Poznámky

1. Na dosiahnutie čo najpresnejších výsledkov, odporúčame čo najdôkladnejšie vyčistenie testovacej komory od predchádzajúceho dychu, najmä pri opakovaných meraniach idúcich po sebe. Tohto môžete dosiahnuť pretrepaním prístroja v ruke po smeru fúkacieho náustku niekoľkokrát tam a späť. Dokonalé vyčistenie zaistíte prúdom čistého vzduchu napr. z ventilátora.
2. Ak sú slabé batérie, bliká ikona na displeji. Batérie v takomto prípade ihneď vymeňte za nové.
3. Vypnutie prístroja tlačidlom alebo automaticky po 35 sekundách znamená prechod do úsporného režimu. Pokiaľ viete, že nebudete prístroj dlhšiu dobu používať a chcete ušetriť batérie pred pomalým vybíjaním, vyberte ich.
4. Pokiaľ nie je tester používaný dlhšiu dobu, môžu sa výsledky prvých dvoch testov líšiť od skutočných hodnôt. Pokiaľ je rozdiel medzi dvoma meraniami väčší než 0,3 ‰, mali by ste uskutočniť ďalšie meranie.
5. Pri fúkaní do prístroja neblokujte výstup vzduchu z prístroja – došlo by k nepresnému meraniu.

Skladovanie a používanie

1. Prístroj skladujte v suchom prostredí bez výskytu chlórových alebo korozívnych plynov.
2. Za normálnych okolností činí životnosť polovodičového čidla viac než 2 roky.
3. Nevystavujte prístroj pádom, nárazom alebo otrasom. V prípade poškodenia nárazom je prístroj prakticky neopraviteľný.
4. Čistite suchou utierkou bez použitia abrazívnych prostriedkov alebo rozpúšťadiel.

5. V súlade s predpismi a normami by mal byť prístroj prekalibrovaný každých 6 mesiacov.
6. !!! Meranie ihneď alebo veľmi krátko po vypití alkoholu je nepresné a väčšinou dôjde i k poškodeniu meracieho senzora. Reklamácia z tohto dôvodu je potom neoprávnená.

Upozornenie:

Digitálny analyzátor 1T07 by mal byť používaný len ako obecné vodítko pre zistenie hladiny alkoholu vo vašom tele.

Hladinu alkoholu v dychu môže ovplyvňovať rada faktorov (napr. plyny zo vzduchu, fajčenie, rôzne pachy z úst apod.). Namerané hodnoty sú preto len orientačné. Výsledok testu by nemal byť považovaný za nespornú určovaciu schopnosť bezpečne riadiť vozidlo, prevádzkovať zariadenie alebo vykonávať iné nebezpečné činnosti. Predajca ani výrobca nenesú žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z používania tohto prístroja. **NEPITE ALKOHOL PRED JAZDOU!** Technické parametre sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické dáta

1.	Rozsah merania:	0,00 ‰, 0,10 ~ 1,5 ‰, presnosť merania $\pm 0,2$ ‰
2.	Napájanie:	2 ks 1,5V alkalických batérií typ AAA
3.	Displej:	digitálny s dvoj farebným podsvietením
4.	Úsporný režim:	cca 35 sekúnd po skončení posledného testu
5.	Dĺžka meraného výdychu:	približne 6-7 sekúnd neprerušovaného prúdu vzduchu
6.	Rozmery:	105 x 39 x 12 mm
7.	Hmotnosť:	45g (bez batérií)
8.	Nastavená hodnota na upozornenie:	0,2‰ BAC
9.	Norma:	CE
10.	Príslušenstvo:	2 ks náustkov
11.	Prevádzková teplota:	+5 °C / 45 °C